



ARKANTA



***Soluzioni
per laboratori***

SOLVENTE PER LENTI



Il solvente Markaway è un prodotto eccezionale per **rimuovere i segni di pennarello** dalle lenti, in modo veloce e sicuro.

Oltre al flacone, la versione in penna è la scelta migliore per le rimozioni express.

Prodotto in Canada.

DESCRIZIONE	CODICE
Flacone da 250ml	501021 - Confezione singola
Flacone da 500ml	501020 - Confezione singola
Flacone da 1L	501022 - Confezione singola
Penna	501023 - Confezione singola

Vantaggi:

1. Non contiene acetone.
2. Efficace e sicuro su lenti progressive, in policarbonato, ad alto indice o con trattamento anti-riflesso.
3. Non danneggia la lente o la montatura dell'occhiale.
4. Dissolve inchiostro, grasso, colla ed etichette adesive.
5. Si asciuga velocemente.
6. Non lascia residui oleosi.

Modalità d'uso della soluzione liquida:

1. Inumidire un panno o un batuffolo di cotone nella soluzione Markaway per 2 secondi.
2. Strofinare delicatamente sull'area segnata della lente fino a quando i segni verranno rimossi.

Il panno bagnato può essere riutilizzato fino a quando il liquido di Markaway resta attivo.

SOLUZIONE DECOLORANTE PER LENTI



Innovativa soluzione decolorante inodore che **rimuove velocemente ogni tinta**, danneggiata o indesiderata, delle lenti.

Può essere utilizzata su lenti graduate e colorate, in policarbonato e ad alto indice.

DESCRIZIONE	CODICE
Flacone da 1L	504020 - Confezione singola

Vantaggi:

1. A base d'acqua.
2. Atossico.
3. Non danneggia la lente.
4. Biodegradabile.
5. Pronto all'uso.

Modalità d'uso:

1. Versare il liquido in un recipiente.
2. Riscaldare il contenuto fino a 98°, o temperatura più alta.
3. Immergere le lenti nella soluzione, fino a quando sarà stata raggiunta la decolorazione desiderata.
4. Lavare le lenti con acqua e tingerle del colore desiderato.
5. Aggiungere dell'acqua fresca nel recipiente per compensare l'eventuale perdita dovuta all'evaporazione e continuare a usare il liquido.

PROTEZIONE UV400 PER LENTI



Soluzione di protezione UV400 che dà alle lenti in plastica una **protezione dai raggi ultravioletti**.

Il suo utilizzo non è adatto a lenti in policarbonato o in vetro.

DESCRIZIONE	CODICE
Flacone da 1L	501024 - Confezione singola

Vantaggi:

1. Penetra nella superficie della lente.
2. Non ingiallisce.
3. Non danneggia la lente.
4. Azione duratura nel tempo.
5. Tempo di trattamento da 10 a 15 minuti.

Modalità d'uso:

1. Agitare il flacone prima dell'utilizzo.
2. Versare il contenuto in un recipiente pulito o in un serbatoio di acciaio inossidabile per la tintura.
3. Riscaldare il liquido, da un minimo di 93° fino a un massimo di 96°, e mescolare fino a quando tutti i cristalli si saranno completamente sciolti. Mantenere la temperatura superiore a 90°.
4. Vanno trattate lenti pulite, non colorate, immergendole nella soluzione attraverso l'utilizzo di un supporto per lenti in plastica o acciaio inossidabile.
5. Immergere per 7-10 minuti e risciacquare con una soluzione di sapone delicato.
Procedere alla colorazione con qualsiasi colore desiderato, utilizzando un contenitore diverso.

NOTA: Utilizzare acqua distillata per sostituire la soluzione evaporata. Dopo il trattamento, le lenti vanno controllate utilizzando un misuratore UV per garantire i livelli di assorbimento adeguati. Quando non è in uso, coprire la soluzione. Non contaminare le lenti, o la soluzione, con il colorante. Conservare i flaconi non aperti in un luogo fresco e asciutto.

SOLUZIONE PER ULTRASUONI SUPER CONCENTRATA



Detergente neutro ad azione rapida per l'utilizzo in bagni ad ultrasuoni.

Pulisce a fondo eliminando grasso, oli, particelle e depositi. Rimuove e sgrassa rapidamente montature e lenti.

DESCRIZIONE	CODICE
Flacone da 500ml	504023 - Confezione singola

Vantaggi:

1. Biodegradabile.
2. Senza fosfati.
3. Sicuro sulla maggior parte dei materiali.
4. Pronto all'uso.

Modalità d'uso:

1. Aggiungere 10-30 ml di soluzione per litro d'acqua, a seconda del grado di sporcizia.
2. Sciacquare bene con acqua pulita dopo averlo rimosso dal bagno.
3. Lasciare asciugare o asciugare secondo necessità.

Precauzioni:

Test consigliato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Non ingerire. Evitare il contatto con occhi e pelle. Evitare ogni contatto con ferite aperte. Non mescolare con acidi o basi.

LIQUIDO PER RIMOZIONE TRATTAMENTO ANTIRIFLESSO



Liquido per la rimozione del trattamento anti-riflesso, ad azione rapida.

DESCRIZIONE	CODICE
Flacone da 250ml	504022 - Confezione singola

Precauzioni:

Lavare accuratamente la pelle esposta dopo l'utilizzo.

Non mangiare, bere o fumare quando si utilizza questo prodotto.

Evitare il contatto con gli occhi, pelle o indumenti.

Indossare guanti o indumenti protettivi, occhiali di protezione per gli occhi, maschera di protezione del viso.